

Mise du masque N95 MEDICOM



1. Tirer sur les bords supérieur et inférieur du respirateur pour l'ouvrir complètement



2. Pliez le pince nez en formant une courbure légère en forme de V



3. Séparez le ruban de chaque coté de la fente au milieu



4. Mouler le pince-nez à la forme du visage et vérifier l'étanchéité

Retrait du masque N95 MEDICOM



1. Positionnez le ruban inférieur autour de la nuque et le ruban supérieur au-dessus de la tête



2. Inclinez la tête vers l'avant et utilisez les 2 mains pour retirer le respirateur en maintenant une tension sur les 2 rubans afin d'éviter la contamination



3. Jeter le masque N95 à la poubelle



4. Pratiquer l'hygiène des mains